

## Guía de desinfección para puntas de escáner

1. Antes de CADA uso, la punta del escáner debe desinfectarse y (o) esterilizarse.
  2. La punta del escáner tiene un peligro medio y debe esterilizarse o desinfectarse a un nivel alto. La punta del escáner es consumible. Después de desinfectar la punta a alta temperatura y presión de aire 100 veces, deséchela y use una nueva.
- 
1. Después del escaneo intraoral, separe la punta del escáner y el cuerpo del escáner. Coloque la punta del escáner en la bandeja de instrumentos para limpiarla más tarde.
  2. Limpie el escáner a. Limpie la punta con un trozo de gasa con alcohol o CaviWipes para asegurarse de que esté totalmente seca, por dentro y por fuera. Ver figura 1.
  3. Doble la gasa en una tira similar al tamaño de la punta del escáner. Ver figura 2.
  4. Llene la lente con una gasa. Ver figura 3.
  5. Selle la punta en la bolsa de esterilización (vea la Figura 4) y coloque la bolsa en el autoclave.
  6. Configure los parámetros del autoclave: 134°C, presión relativa 205,8 kPa y 4 minutos; o 121°C, presión relativa 102,9 kPa y 30 min. Implementa el paso en vacío.



Figura 1

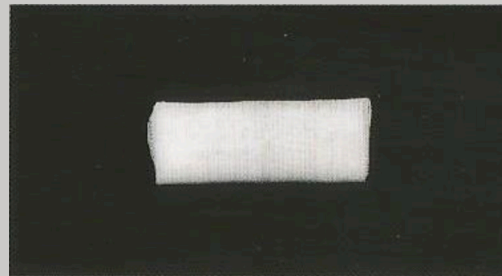


Figura 2

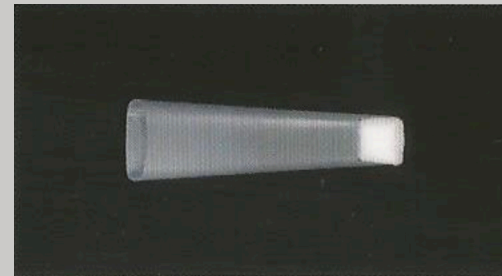


Figura 3



Figura 4

El proceso de limpieza y desinfección de la punta del escáner cumple con el Reglamento para la técnica de desinfección y esterilización de instrumentos dentales WS 506-2016.



## Guía de desinfección para puntas de escáner

### Precauciones

1. Antes de CADA uso, la punta del escáner debe desinfectarse y (o) esterilizarse.
2. La punta del escáner presenta un peligro medio y debe esterilizarse o desinfectarse a un nivel alto.
3. Tome medidas de protección cuando desinfecte la punta del escáner con el líquido desinfectante.

### Pasos de funcionamiento

1. Después del escaneo intraoral, separe la punta del escáner y el cuerpo del escáner. Coloque la punta del escáner en la bandeja de instrumentos.
2. Limpiar la punta del escáner. Limpie la punta con un trozo de gasa con alcohol o CaviWipes.
3. Asegúrese de que no haya daños en la punta del escáner y de que la punta se haya limpiado a fondo.

### Desinfección de alto nivel con orto-ftalaldehído (OPA)

1. Use guantes antes de realizar la operación de desinfección.
2. Separe la punta del escáner y el cuerpo del escáner.
3. Limpie previamente la punta del escáner.
4. Ponga orto-ftalaldehído en una taza. El líquido debe cubrir completamente la punta del escáner (5,5 g / L, pH 7,0-8,0, 20-25 °C)

#### Observación:

Si la frecuencia de desinfección reciclada no es alta, se puede usar un barril de orto-ftalaldehído hasta por 14 días (la concentración debe ser superior al 03%)

5. La punta del escáner debe sumergirse durante 12-30 minutos.
6. Limpie la punta del escáner cuidadosamente con agua destilada.
7. Seque bien la punta del escáner con un paño que no suelte pelusa para asegurarse de que esté totalmente seca.